


# Instruktion

## Du behöver:

- en burk med orange lock
- 2 tomma vakuurrör med orange kork
- ett rör med blå kork innehållande gul vätska
- förfrankerad box (denna)
- plastpåse med absorbtppapper
- streckoder (ett ark på 10 etiketter rivs av från medföljande rulle. OBS! Kasta de överblivna!)

## Gör så här:

1. Fyll i remissen i portalen ([prodia.portal.se](http://prodia.portal.se))
2. Låt klienten skölja munnen eller dricka ett glas vatten och därefter säga några meningar (så vattnet säkert svalts undan). Ta av den blå gummikorken från provröret med guldfärgad vätska. Låt klienten ta den citronsmakande vätskan i munnen i **2 minuter**.
3. Vätskan spottas sen ner i den stora burken med orange lock. Sätt på locket men skruva inte på locket hela vägen ner så sprutspetsen når helt i botten, då kan inte saliven sugas upp.
4. Drag av den runda pappersetiketten på locket. Ställ burken på plan yta. Tryck ner provrören (med orange gummipropp), ett i taget, på nålen i gropen. Vätskan sugas upp i vakuurrören. Om vätskan inte sugas upp i rören, backa burkens skruvlock lite så luft släpps in. Dra ev. upp första röret när det är halvfullt så räcker provet till **två rör**. Viktigt vid omkörning.

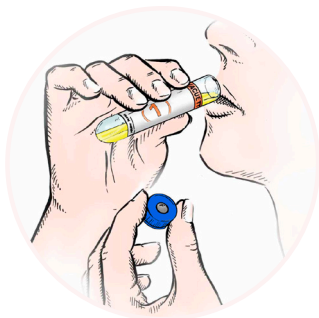

5. Sätt på streckodsetiketter:
  - En på varje provrör (B-prov är viktigt för att på begäran kunna köra om analysen)
  - Kasta de överblivna streckoderna på arket när du är klar.
6. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
7. Lägg i kartongen:
  - Den förslutna plastpåsen med provrören.
8. Förslut kartongen och posta.