



prodia.

Bruksanvisning Snabbtester Urin

Våra singelstickor är lämpliga när du vill följa en bestämd substans. Våra multistickor testar från 4 och upp till 21 olika substanser i samma prov.


Snabbtester är antikroppsbaseade. Vid positivt resultat rekommenderar vi alltid att ni verifierar resultatet hos vårt laboratorium för att få ett 100% juridiskt hållbart svar.

Testerna är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg och vid ankomst.

För ev. korsreaktioner, se vår hemsida: www.prodia.se/korsreaktion

- ✓ Kontrollera datum och att förpackningen är hel.
- ✓ Förpackningen ska vara rumtempererad innan du öppnar den.
- ✓ Ta emot minst ½ mugg urin och kontrollera temperatur och färg.
- ✓ Öppna testförpackningen omedelbart före användandet.
- ✓ Ta av locket och doppa remsornas ändrar (ej det röda på plattan) i urin tills vätskenivån stiger i fönstren, ca 15 sek. Sätt gärna på locket igen.
- ✓ Testet ska nu ligga plant eller ha ändarna nedåt.
- ✓ Testet ska inte avläsas senare än efter 10 min.

Tolka testresultat

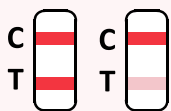

Negativt resultat


Två röda linjer syns i avläsningsfönstret: en testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som bekräftar att tillräcklig mängd vätska sugits upp till provet. Styrkan på testlinjen kan variera och vara svagare/starkare än kontrollinjen. Läs av efter 1-10 min.



Positivt resultat

Endast en röd linje uppstår i kontrollområdet (C). Låt minst 5 min (helst 10 min) gå innan testet förklaras vara positivt. Verifiera positiva resultat hos ackrediterat laboratorium.

OBS! Testet ger endast preliminära resultat.

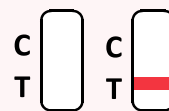

Ogiltigt resultat

Ingen kontrollinje uppstår. Mest sannolika skäl för utebliven kontrollinje: otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat alt för gammalt test eller inkorrekt testprocedur. Gå igenom testrutinerna igen och upprepa med nytt test. Om problemet kvarstår, kontakta Prodia.