



# Provtagning: saliv

1

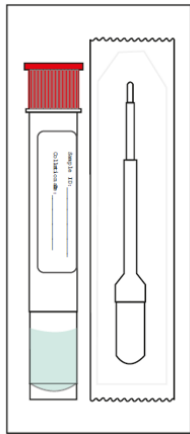


Be provlämnaren att skölja munnen med vatten. Säkerställ sedan att provlämnaren inte har mat eller vätska kvar i munnen innan provtagningen påbörjas genom att be hen att säga några ord.

2

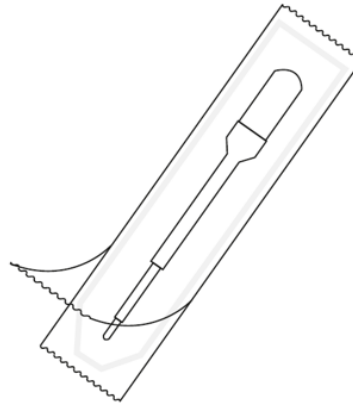


Öppna förpackningen och ta ut spateln.

3

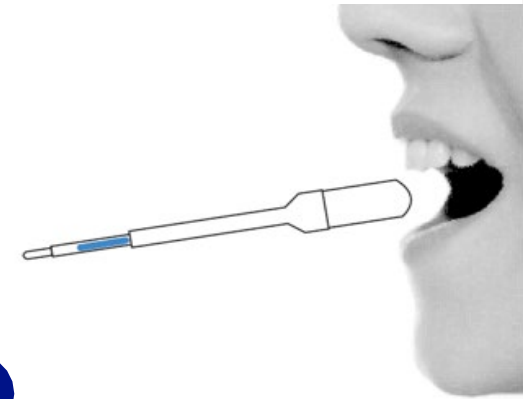


Instruera provlämnaren att placera spateln under tungan och därefter bita försiktigt på plastdelen för att vata filtret. Spateln ska vara kvar i munnen tills indikatorn visar blått.

4

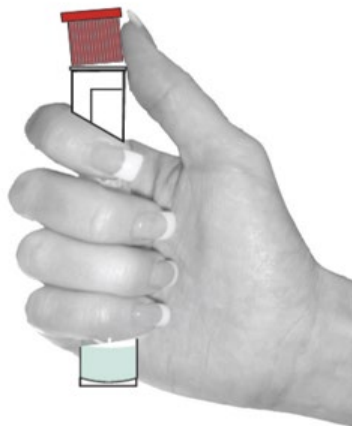

När indikatorn blivit blå öppnar du provröret med blågrön lösning (lättast är att dra rakt uppåt). Var noga med att inte spilla ut innehållet.

5

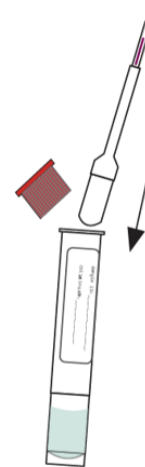

För ned spateln i provröret med vätskan.

6



Sätt på locket och sätt på streckkod. Lägg ned provröret i säkerhetspåsen och förslut. Lägg påsen i den förfrankade boxen och lägg på närmsta postlåda. Glöm ej att fylla i tillhörande remiss i analysportalen!