


**Kitet innehåller:** 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, säkerhetspåse, förfrankerad box. Streckkodsrulle har ni sedan tidigare - inför varje enskild provtagning river du av ett ark med 10 etiketter från rullen.

**Du behöver även en urinmugg (ingår ej i kitet).**

---

## Gör så här:

1. Fyll i remissen digitalt på [portal.prodia.se](http://portal.prodia.se)
2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.
  - a) Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
  - b) Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
  - c) Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
  - d) Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret
  - e) Skruva på det lilla locket.
  - f) Upprepa med nästa rör.

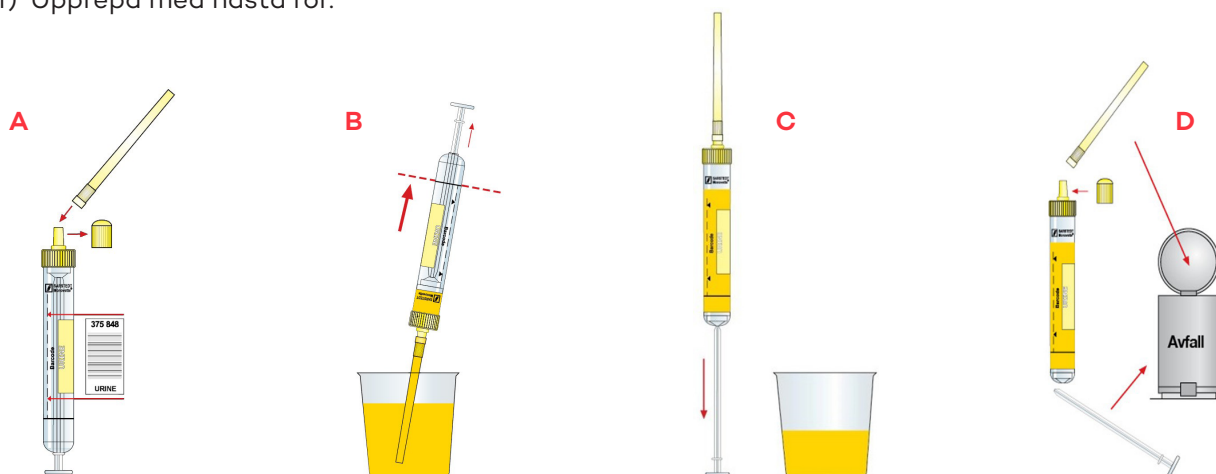

3. Sätt på streckkodsetiketter:

- En på varje provrör
- Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian.
- Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
- Du sätter ingen fysisk streckkod på remissen men du skriver/scannar streckkodsnumret när du fyller i remissen i analysportalen.

4. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.

5. Lägg ned i kartongen:

- Den förslutna plastpåsen med provrören.

6. Förslut kartongen och posta.

**prodia.**