


Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss (som du nu läser), streckkoder finns bara i provkit. Sedan river du av ett ark med 10 etiketter från egen rulle.

Du behöver även en urinmugg (ingår ej i kitet).

Gör så här:

1. Fyll i remissen på omstående sida. Ange klientens initialer, *ej namn eller personnummer*.
Var noga att ange **e-postadress** och **kundnummer**.
2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.
 - a) Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
 - b) Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
 - c) Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
 - d) Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret
 - Skruva på det lilla locket.
 - Upprepa med nästa rör.

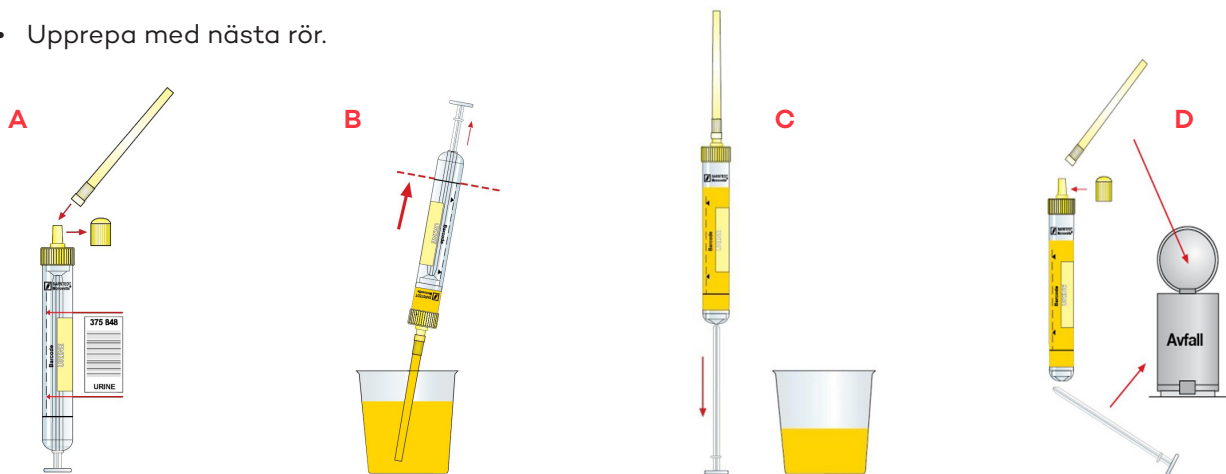

3. Sätt på streckkodsetiketter:
 - En på varje provrör
 - En på remissen, översta vänstra hörnet
 - Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian.
 - Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
4. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
5. Lägg ned i kartongen:
 - Den förslutna plastpåsen med provrören.
 - Remissen, glöm ej ange **e-postadress** och **kundnummer**.
6. Förslut kartongen och posta.

prodia.